

# HEINE Cube Kurzanleitung

1. Schließen Sie Ihren HEINE Cube über das mitgelieferte Stromkabel an. Der HEINE Cube wird über die ON Taste gestartet.



2. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem HEINE Cube WLAN. Dieses startet automatisch nach ca. 2 Min.



SSID: HEINE-Cube  
Password: heinecube

3a. Öffnen Sie auf Ihrem  
Mac / Windows / Tablet



einen der gängigen Browser



HEINE Cube Adresse öffnen  
192.168.88.1

Anmelden

3b. Sie haben ein  
iPhone\* ab Version 5s



HEINE Cube App herunterladen



App öffnen und Adresse eingeben  
192.168.88.1

Anmelden

## ANMELDEN

Melden Sie sich an, um die Anwendung zu ermöglichen

Nutzername

Passwort

Los geht's!

