

# HEINE DELTA 30

Lo más destacado, en resumen



Campo de visión  
30 mm Ø reales

Con solo pulsar  
un botón se  
puede alternar  
entre luz polarizada  
y no polarizada =  
función «Toggle».  
Más información  
en [heine.com/es/  
Toggle](http://heine.com/es/Toggle)

3 niveles de luminosidad  
On/Off

Recarga con cable  
micro USB o Charger 30  
cargador de mesa

# HEINE DELTA 30

Lo más destacado, en resumen



●●●●●  
Estado de carga  
60-100 %

●●●●●  
Estado de carga  
33-66 %

●●●●●  
Estado de carga  
10-33 %

●●●●● \*intermitente  
Estado de carga  
<10 %



El diodo está iluminado  
en azul = iluminación  
polarizada

El diodo está  
apagado = iluminación  
no polarizada

Un vídeo vale más que 1000 palabras



El vídeo «Aplicación del DELTA 30» muestra el DELTA 30 en acción en el paciente.



En el vídeo «El DELTA 30 y la app DERM» puede descubrir cómo se usa el DELTA 30 con la app exclusiva HEINE DERM para la documentación digital.

