

HEINE iC1 Quick Start Guide



Download the HEINE iC1 App in the AppStore.

Descargue la app HEINE iC1 en la AppStore.



Place the iPhone* in the appropriate mobile phone case until it engages. Please make sure the camera is in the correct position.

Introduzca el iPhone en la funda adecuada hasta que encaje. Al hacerlo, preste atención para que la cámara se encuentre en la posición correcta.*



Attach the mobile phone case to the HEINE iC1 until it engages.

Introducción de la funda adaptadora en el HEINE iC1 hasta que encaje.




Switch on.

Encienda el aparato.

*Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.



The device automatically starts in polarisation mode. The toggle function allows you to alternate between polarised images and immersion images. *El aparato se arranca en el modo de polarización. Con la función Toggle se puede alternar entre la toma de polarización y la toma de inmersión.*

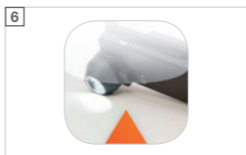

Start the HEINE iC1 App on your iPhone*. Abra en su iPhone* la app HEINE iC1.



Press your thumb through the opening of the mobile phone case to disengage the iPhone*.

Presione con el pulgar en la ranura sacando el iPhone de la funda.*



Charging the HEINE iC1 with the supplied USB cord.

Carga del HEINE iC1 mediante el cable USB suministrado.

Cleaning and Disinfection

Limpieza y desinfección



Please note: To prevent damage to the device, do not spray disinfectants or detergents directly onto the contact plate.

Tenga en cuenta que los productos de desinfección y limpieza no se deben rociar directamente sobre el disco de contacto, ya que esto puede provocar daños.

Recommended cleaning agent for Dermatoscope: Neodisher® MediClean

Recommended disinfectant agent for Dermatoscope: quaternary ammonium compounds (e.g. Cleanisept® Wipes or Microbac® Tissues)

Recommended cleaning agent for contact plate: Neodisher® MediClean

Recommended disinfectant agent for contact plate: quaternary ammonium compounds (e.g. Microbac® Tissues)

Productos de limpieza recomendados para el dermatoscopio: Neodisher® MediClean

Productos de desinfección recomendados para el dermatoscopio: compuestos de amonio cuaternario (p. ej. Cleanisept® Wipes o Microbac® Tissues)

Productos de limpieza recomendados para el disco de contacto: Neodisher® MediClean

Productos de desinfección recomendados para el disco de contacto: compuestos de amonio cuaternario (p. ej. o Microbac® Tissues)