

Adattatore universale per smartphone mag HEINE per DELTA 30 PRO, DELTA 30 e DELTAone.

Documentazione dermatoscopica digitale con la fotocamera dello smartphone.


È SEMPLICISSIMO!



Con l'adattatore universale per smartphone mag HEINE è possibile utilizzare praticamente qualunque smartphone, indipendentemente dal sistema operativo (Android, Windows, ecc.)*.



Applicare quindi l'adattatore sul bottone di fissaggio.

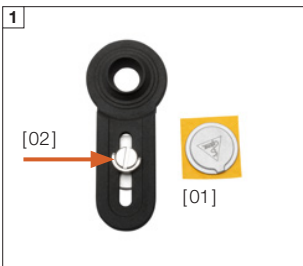

AVVERTENZA IMPORTANTE

Tenere il bottone di fissaggio [01] separato dai magneti prima dell'applicazione sulla cover per smartphone!

Se questi dovessero comunque unirsi, staccare la vite [02] dall'adattatore, avvitare nuovamente e separare in questo modo le due piastre.



Allentare leggermente la vite.

Se il vostro smartphone ha una sola fotocamera, fissate l'adattatore al centro davanti a tale fotocamera.

Se il vostro smartphone ha più fotocamere, dovrete prima verificare quale sia la fotocamera principale: posizionate l'adattatore sulla parte posteriore del vostro smartphone in modo che sia centrato sulla fotocamera principale. Il campo visivo sul motivo nella veduta delle fotocamere è chiaro? Se tutto è in ordine, avvitare il braccio dell'adattatore davanti a questa fotocamera con la vite.



Avete bisogno di un DELTA 30 PRO, DELTA 30 o DELTAone e dell'adattatore universale per smartphone mag, composto da bottone di fissaggio + adattatore, del vostro smartphone e di una cover adeguata**.

La cover dovrebbe avere la parte posteriore rigida in policarbonato o in vetro acrilico.



Togliere la pellicola protettiva e posizionare saldamente il bottone di fissaggio sulla cover a destra al di sotto della lente della fotocamera selezionata.



Il magnete dell'adattatore permetterà di agganciare ora lo smartphone e la sua cover all'anello di messa a fuoco del dermatoscopio.

Ora potete scattare le foto come di consueto con la funzione di fotocamera del vostro smartphone.



*Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Lo smartphone e la cover non sono compresi nel volume di fornitura.

