

HEINE Adaptateur smartphone universel mag pour DELTA 30 PRO, DELTA 30 et DELTAone.

Documentation dermatoscopique numérique avec la caméra du smartphone.


SIMPLE COMME BONJOUR !



Avec l'adaptateur smartphone universel mag HEINE, vous pouvez utiliser pratiquement n'importe quel smartphone, quel que soit le système d'exploitation (Android, Windows, etc.).*



Ensuite, appliquez l'adaptateur sur le bouton de fixation.

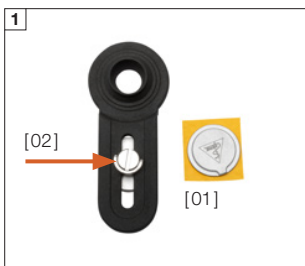

REMARQUE IMPORTANTE

Avant de l'appliquer sur la coque du téléphone portable, maintenez le bouton de fixation [01] séparé des aimants !

S'ils se rencontrent malgré tout, séparez la vis [02] de l'adaptateur, puis tournez-la de nouveau vers l'intérieur et écartez ainsi les deux plaques.



Desserrez légèrement la vis.

Si votre smartphone n'a qu'une seule caméra, fixez l'adaptateur au centre devant cette caméra.

Si votre smartphone est équipé de plusieurs caméras, vous devez d'abord vérifier quelle est la caméra principale : placez le bras de l'adaptateur au dos du smartphone de manière à ce qu'une des lentilles de la caméra se trouve au centre. Le champ de vision sur le sujet est-il clair en vue caméra ? Si tout est correct, fixer le bras de l'adaptateur devant cette caméra à l'aide de la vis.



Vous avez besoin d'un DELTA 30 PRO, DELTA 30 ou DELTAone et de l'adaptateur smartphone universel mag, composé d'un bouton de fixation + d'un adaptateur, ainsi que de votre smartphone et d'une coque de téléphone portable adaptée**. La coque du téléphone portable doit avoir une face arrière dure en polycarbonate ou en verre acrylique.



Retirer le film de protection et appuyer fermement sur le bouton de fixation à droite, sous la lentille de la caméra choisie, au centre de la coque du téléphone portable.



L'aimant de l'adaptateur maintient maintenant le téléphone portable et sa coque sur la bague de mise au point du dermatoscope.

Vous pouvez maintenant prendre des photos avec votre smartphone comme vous en avez l'habitude.



*Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

**Le smartphone et la coque du téléphone portable ne sont pas inclus dans la livraison.

