

HEINE iC1 Quick Start Guide



Télécharger l'app HEINE iC1 dans l'AppStore.
Scarica l'app HEINE iC1 nell'AppStore.



Placer l'iPhone* dans la coque prévue à cet effet jusqu'à emboîtement. Veiller à ce que la caméra soit positionnée en face de « l'œil » de la coque.
Inserire l'iPhone nell'apposito adattatore fino a farlo scattare in posizione. Accertarsi che la videocamera sia nella posizione giusta.*



Insertion de la coque d'adaptation sur le HEINE iC1, jusqu'à enclenchement de ce dernier.
Inserire l'adattatore sull'HEINE iC1 fino a farlo scattare in posizione.




Allumer.
Accendere.

*Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.



L'appareil démarre en mode « Polarisation ». La fonction « Toggle » permet de passer du mode image polarisée au mode image en immersion. L'appareil se met en mode image polarisée. Con la funzione di commutazione é possibile passare dalla modalità a luce polarizzata alla modalità a luce non polarizzata.

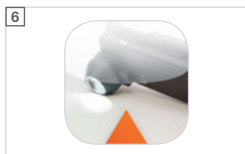

Sur votre iPhone*, démarrer l'app HEINE iC1.
Avviare l'app HEINE iC1 sul proprio iPhone.*



Dessolidariser l'iPhone* de la coque en passant le pouce à travers l'encoche.
Togliere l'iPhone dall'adattatore spingendo con il pollice attraverso l'apertura.*



Charger le HEINE iC1 avec le câble USB fourni.
Caricare l'HEINE iC1 con il cavo USB in dotazione.

Nettoyage et désinfection

Pulizia e disinfezione



Les produits désinfectants et nettoyeurs ne doivent jamais être pulvérisés directement sur l'embout de contact et ce afin de prévenir et d'éviter tout dommage de l'appareil.

Accertarsi che i disinfettanti e i detergenti non vengano spruzzati direttamente sulla piastrina di contatto per evitare danni all'apparecchio.

Nettoyants du dermatoscope recommandés : Neodisher® MediClean

Désinfectants du dermatoscope recommandés : composés d'ammonium quaternaire (par ex. Cleanisept® Wipes ou Microbac® Tissues)

Nettoyants de l'embout de contact recommandés : Neodisher® MediClean

Désinfectants de l'embout de contact recommandés : composés d'ammonium quaternaire (par ex. Microbac® Tissues)

Detergente consigliato per il dermatoscopio: Neodisher® MediClean

Disinfettante consigliato per il dermatoscopio: ammonio quaternario

(ad esempio Cleanisept® Wipes o Microbac® Tissues)

Detergente consigliato per la piastrina di contatto: Neodisher® MediClean

Disinfettante consigliato per la piastrina di contatto: ammonio quaternario

(ad esempio Microbac® Tissues)