

Ritrattamento igienico

HEINE Charging Case CC1 e Wall Charger CW1

Avvertenza generale e informazioni sulla sicurezza



AVVERTENZA! Questa segnalazione indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto di questa avvertenza può portare a lesioni di piccola o media portata.



NOTA! Questo simbolo indica informazioni utili che sono importanti ma non associate a pericoli.

	Attenersi alle istruzioni per il ritrattamento igienico secondo gli standard nazionali, le leggi e le linee guida. Le misure di ritrattamento descritte non sostituiscono le regole specifiche applicabili presso la vostra istituzione / il vostro dipartimento.
	Se si sospetta una contaminazione, procedere ad una igienizzazione. HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG approva unicamente gli agenti e le procedure elencati nelle presenti istruzioni. Il ritrattamento igienico deve essere eseguito da persone con competenza igienica adeguata. Attenersi alle istruzioni dei produttori delle sostanze di preparazione. Evitare che penetrino liquidi nel dispositivo. Prima del trattamento, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione.
	Inserire solo i dispositivi rielaborati nel caricabatterie. Assicurarsi che lo strumento sia completamente asciutto dopo la pulizia, prima di riutilizzarlo.
Limiti del ritrattamento	Verificare periodicamente che il dispositivo sia integro.



Disinfezione per strofinamento

1. Pulizia manuale e disinfezione



- Prestare attenzione ad umettare completamente tutte le superfici contaminate per tutto il tempo di applicazione indicato dal produttore della soluzione disinfettante. Aumentare eventualmente il numero di procedure di strofinamento e/o il numero di passaggi.

Attrezzatura

- Salviette disinfettanti:
alcolico (ad es. Incides N o mikrozyd universal wipes) o
alcolico + a base di sali d'ammonio quaternario (ad es. Super Sani-Cloth)
- In caso di utilizzo di materiali di trattamento diversi da quelli raccomandati, accertarsi che questi non formino schiuma.

Implementazione

- Detergere e disinfettare le superfici contaminate per strofinamento manuale.
- Prestare particolare attenzione alle aree di difficile.
- Per rimuovere il disinfettante e quindi asciugare, seguire le istruzioni fornite dal produttore del disinfettante.
- Il cavo e l'alimentatore devono essere puliti solo se necessario e con un panno asciutto.

2. Ispezione e test di funzionamento



- Prima dell'uso verificate il funzionamento corretto dell'apparecchio.
Non utilizzate l'apparecchio se rilevate danneggiamenti.

