

Sauberkeit optischer Teile Ihrer HEINE Geräte

Verschmutzungen der äußeren optischen Flächen durch z.B. Staub und Fingerabdrücke, können eine Reinigung erforderlich machen.

Hinweis: Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel können Kunststofflinsen oder die Linsenverklebung angreifen.

Vorgehensweise:

- Entfernen Sie zunächst vorsichtig lose Partikel mit Druckluft oder speziellen Kamerapinseln.
- Feuchten Sie ein sauberes Wattestäbchen (Baumwolle) oder ein Spezialtuch für die Säuberung von Optiken (z.B. WHATMAN Lens Cleaning Tissue 105 oder Tiffen Lens Cleaning Paper) an und tupfen Sie überschüssige Tropfen auf einem sauberen saugfähigen Material ab.
 - Für den ersten Säuberungsschritt: Mit Wasser.
 - Für ölige und fettige Verunreinigungen: Eine milde Lösung aus Spülmittel und destilliertem Wasser (z.B. 5 Tropfen in 10ml).
- Wischen Sie immer mit geringem Druck und von der Mitte spiralförmig bis hin zum Rand.
- Wiederholen Sie das spiralförmige Wischen mit frischen angefeuchteten Wattestäbchen oder Spezialtüchern bis die Säuberung erfolgreich ist.
- Entfernen Sie die Rückstände von Reinigungsflüssigkeiten mit einem trockenen Wattestäbchen oder Spezialtuch.

