

Propreté des parties optiques de vos appareils HEINE

La contamination des surfaces optiques extérieures, p. ex. la poussière et les traces de doigts, peut nécessiter un nettoyage.

Remarque: Les produits de nettoyage contenant des solvants peuvent abîmer les lentilles en plastique ou altérer la propriété adhésive des lentilles.

Méthode :

- Tout d'abord, éliminez soigneusement les particules non adhérentes à l'aide d'air comprimé ou d'une brosse spécial optique.
- Humidifiez un coton-tige propre ou une lingette/feuille de papier nettoyante spécial optique (p. ex. WHATMAN Lens Cleaning Tissue 105 ou Tiffen Lens Cleaning Paper) et tamponnez l'excès d'humidité en utilisant un tissu absorbant propre:
 - Pour la première étape de nettoyage : Utilisez de l'eau.
 - En cas de polluants huileux et gras : Utilisez une solution douce de détergent et d'eau distillée (p. ex. 5 gouttes dans 10 ml).
- Nettoyez en effectuant toujours une légère pression à partir du centre dans un mouvement de spirale.
- Procédez à un second nettoyage en spirale à l'aide de cotons-tiges fraîchement humidifiés ou de lingettes spéciales jusqu'à obtention du résultat souhaité.
- Enlevez tous les résidus du liquide de nettoyage à l'aide d'un coton-tige sec ou d'une lingette spéciale.

