

# Reconditionnement hygiénique

## Lampes frontales HEINE

LoupeLight 2, MicroLight 2, ML 4 LED HeadLight

### Informations générales en matière d'avertissement et de sécurité



**AVERTISSEMENT!** Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect des consignes peut entraîner des accidents corporels mineurs à modérés.



**REMARQUE!** Ce symbole est utilisé pour des informations. Il est important mais ne renvoie pas à un danger.

	Les instructions relatives au reconditionnement hygiénique doivent être respectées sur la base des normes, lois et directives nationales. Les mesures de reconditionnement décrites ne remplacent pas les règles spécifiques en vigueur de votre institution/département.
	En cas de soupçons de contamination, procéder à un traitement hygiénique. HEINE Optotechnik n'approuve que les agents et procédures répertoriés dans ces instructions. Le reconditionnement hygiénique doit être effectué par des personnes possédant d'expertise hygiénique adéquate. Veuillez tenir compte des instructions du fabricant relatives au fluide de reconditionnement appliqué. Éviter la pénétration de liquides dans le dispositif. Avant de procéder au traitement, débrancher le dispositif de l'alimentation électrique.
	Après le nettoyage, s'assurer que l'appareil est complètement sec avant de le réutiliser. Pour le filtre polarisant et filtre jaune, ne pas utiliser de produits de retraitement à l'alcool.
Limitations en matière de reconditionnement	Contrôler à intervalles réguliers l'intégrité de l'appareil. Les filtres polarisants peuvent être retraités jusqu'à 50 fois.



## Désinfection par essuyage

### 1. Préparation

Désactiver le dispositif et le laisser refroidir.

### 2. Nettoyage et désinfection manuelle



Veiller à ce que toutes les surfaces soient entièrement humectées pendant le temps d'exposition complet spécifié par le fabricant du désinfectant. Si nécessaire, augmenter le nombre de procédures d'essuyage et/ou le nombre d'essuyages.

#### Équipement

- Détergent, si nécessaire: enzymatique (p. ex. neodisher® MediClean)
- Produit de désinfection:  
d'ammonium quaternaire (p. ex. Cleanisept® Wipes, Mikrobac® Tissues ou Sani-Cloth® AF3)  
ou  
peroxyde d'hydrogène (p. ex. PREempt™ Wipes)
- En outre, seulement pour LoupeLight 2 et MicroLight 2: alcoolique (p. ex. Incides® N)

#### Mise en œuvre

- Pour les saletés plus importantes, vous pouvez d'abord procéder au nettoyage avec un chiffon imbibé d'agent nettoyant avant de désinfecter avec une lingette désinfectante.
- Nettoyer et désinfecter les lampes frontales, leur câble, les options et les bandeaux à la main.
- Faire tout particulièrement attention aux zones difficiles d'accès.
- Essuyer bien les surfaces que vous touchez par ex. les éléments de fonctionnement, les commandes rotatives et les éléments de verrouillage.
- Nettoyer le coussinet du bandeau de tête avec une lingette imbibée d'eau ou si nécessaire avec une lingette désinfectante.
- Pour éliminer le désinfectant et procéder ensuite au séchage, suivre les instructions fournies par le fabricant du désinfectant.
- Nettoyer le câble et l'alimentation électrique seulement si nécessaire et uniquement avec un lingette sec.

### 3. Inspection et test de fonctionnement



- Inspecter l'appareil à la recherche de contaminants ou d'abrasions visibles. Procéder à un nouveau reconditionnement si nécessaire. Jeter s'il est impossible d'éliminer les contaminants.

### 4. Stockage

La stocker de sorte à la protéger contre toute recontamination, de la poussière et de l'humidité.

