

# HEINE OMEGA 600

## Das Wichtigste in Kürze

Wir sagen Danke, dass Sie sich für das neue HEINE OMEGA 600 entschieden haben und wünschen viel Erfolg und Freude bei der Arbeit mit Ihrem neuen Instrument.

Wenn Sie Ihre Erfahrungen oder Entdeckungen mit uns teilen möchten, würden wir uns sehr darüber freuen: #heine #iuseheine #OMEGA600



**USB-C-Anschluss**  
Aufladen mit USB-C Kabel

**Ladestands-  
anzeige**

● ● ● ●  
66–100 %

● ● ● ●  
33–66 %

● ● ● ●  
10–33 %

● ● ● ● \* blinkt  
< 10 %


**Helligkeitsregler**

An/Aus, stufenlose Helligkeit von 3–100 %, und visionBOOST von 100–245 % für eine bis zu 20 % bessere Sicht auf die Netzhaut bei Medientrübungen. Für Rechts und Linkshänder positionierbar.

**Filterhebel**



Rotfrei-, Gelb- und Blaufilter

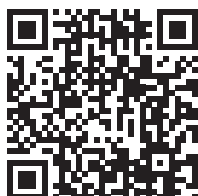

Das Video „Einstellung des OMEGA 600“ erklärt Schritt für Schritt, wie Sie das Instrument an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

# HEINE OMEGA 600

Das Wichtigste in Kürze



Hebel zur Einstellung der stereoskopischen HEINE Technologie  
Bestmögliche 3D-Bildgebung für jede Pupillengröße und äußere Peripherie



**Flip-Up Funktion der Optikeinheit**  
Zur Interaktion mit dem Patienten



**Okulare mit Klickverschluss**  
Um Ihre Sicht zu optimieren, können Sie die montierten Linsen mit +2D gegen die mitgelieferten neutralen Linsen 0D austauschen



Mitbeobachter-Spiegel TM2



Kopfband Weiteneinstellung



Staubschutzkappe für Frontscheibe

