

Hygienische Wiederaufbereitung

HEINE indirektes Ophthalmoskop OMEGA 600 und OMEGA 600 wired

Allgemeine Warn- und Sicherheitsinformationen



WARNUNG! Dieses Symbol macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam. Die Nichtbeachtung kann zu leichten oder mittleren Verletzungen führen.



HINWEIS! Dieses Symbol wird für Informationen verwendet, die wichtig, jedoch nicht mit Gefahren verbunden sind.

	<p>Nachfolgende Angaben zur hygienischen Wiederaufbereitung müssen gemäß nationalen Normen, Gesetzen, Richtlinien und Empfehlungen umgesetzt werden. Die beschriebenen Maßnahmen zur hygienischen Wiederaufbereitung ersetzen nicht die jeweils für den Betrieb gültigen Vorschriften.</p>
	<p>Nehmen Sie bei Kontaminationsverdacht eine hygienische Aufbereitung vor.</p> <p>HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG gibt nur die hier empfohlenen Mittel und Verfahren frei.</p> <p>Die hygienische Wiederaufbereitung ist nur von einer Person mit ausreichender hygienischer Sachkompetenz durchzuführen.</p> <p>Beachten Sie die Angaben der Hersteller der Aufbereitungsmittel.</p> <p>Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten.</p> <p>Trennen Sie das Gerät vor der Aufbereitung von der Stromversorgung.</p>
	<p>Achten Sie darauf, dass das Gerät nach der Aufbereitung vollkommen trocken ist bevor Sie es wiederverwenden.</p>
<p>Einschränkung der hygienischen Wiederaufbereitung</p>	<p>Überprüfen Sie regelmäßig die Unversehrtheit des Geräts.</p> <p>TM: Max. 50 Zyklen</p>



Reinigende Wischdesinfektion

1. Vorbereitung

Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.

Nehmen Sie den TM (wenn vorhanden) ab und bereiten Sie ihn separat auf.

2. Manuelle reinigende Wischdesinfektion



- Achten Sie auf die vollständige Benetzung aller kontaminierten Oberflächen für die komplette vom Desinfektionsmittelhersteller angegebene Einwirkzeit. Erhöhen Sie, wenn hierfür erforderlich, die Anzahl der Wischvorgänge und/oder die Anzahl der Tücher.
- Reinigen und desinfizieren Sie die optischen Flächen nur wenn nötig mit einem Desinfektionstuch. Ansonsten oder um Rückstände zu entfernen, reinigen Sie sie gemäß der Anleitung "Sauberkeit optischer Teile Ihrer HEINE Geräte" (MED 234574)

Ausstattung

- Desinfektionstücher:
alkoholisch (z. B. Incides N oder mikrocid universal wipes) oder
alkoholisch + quartäre Ammoniumverbindungen (z.B. Super Sani-Cloth)
- Wenn Sie andere als die empfohlenen Aufbereitungsmittel verwenden, achten Sie darauf, dass diese nicht schäumen.

Durchführung

- Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt manuell.
- Achten Sie besonders auf schwer zugängliche Stellen.
- Wischen Sie die berührten Flächen besonders gründlich: z. B. Bedienelemente, Drehregler, Feststellelemente.
- Reinigen Sie die Polster des Kopfbandes mit einem mit Wasser getränkten Tuch oder wenn nötig mit einem Desinfektionstuch.
- Reinigen und desinfizieren Sie den TM (wenn vorhanden) mit einem alkoholischen Desinfektionstuch manuell.
- Reinigen Sie das Kabel und das Netzteil nur wenn nötig und nur mit einem trockenen Tuch.
- Entfernen Sie die Rückstände und trocknen Sie das Gerät wie vom Hersteller des Desinfektionsmittels gefordert.

3. Kontrolle und Funktionsprüfung



- Das Gerät auf sichtbare Verunreinigungen oder Verschleiß prüfen und gegebenenfalls erneut aufbereiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.

4. Lagerung

Geschützt vor einer Rekontamination, Staub und Feuchtigkeit.

