

HEINE® NC2 Dermatoscope Quick Start Guide

HEINE® NC2 Dermatoskop Kurzanleitung

1



Download the HEINE NC2 App from the App Store*. Open the App.

Download der HEINE NC2 App im App Store*. Öffnen Sie die App.

2



Place the iPhone* in the appropriate mobile phone case until it engages. Please make sure the camera is in the correct position.

*iPhone** in die passende Adapter-schale einsetzen bis es einrastet. Bitte beachten Sie, dass die Kamera an der richtigen Position ist.

3



Push the mobile phone case onto the adapter dock until it clicks into place by sliding it upwards.

Schieben Sie die Adapter-schale auf den Adapter bis die Verriegelung einrastet.



4



Rotate the focusing ring outward to the limit stop such that the eyepiece focuser is moved out as far as possible.

Drehen Sie den Fokussierring bis zum Anschlag heraus, so dass der Okularauszug maximal ausgefahren ist.



Carefully push the fixing bracket of the adapter dock over the eyepiece focuser until the bracket snaps into place and the adapter is firmly connected to the HEINE NC2 Dermatoscope.

Schieben Sie die Haltegabel des Adapters vorsichtig über den Okularauszug, bis die Gabel einrastet und der Adapter fest mit dem HEINE NC2 Dermatoskop verbunden ist.

5



Place the contact plate on the instrument such that it snaps into the recesses. The contact plate is held in place by magnetic force. Remove by slightly twisting.

Setzen Sie die Kontaktscheibe auf das Instrument auf, so dass sie in die Vertiefungen einrastet. Die Kontaktscheibe wird magnetisch gehalten. Zum Abnehmen leicht drehen.



6



Charging the HEINE NC2 Dermatoscope with the supplied USB cord. The iPhone* has to be charged separately.

Laden Sie das HEINE NC2 Dermatoskop mit dem mitgelieferten USB Kabel auf. Das iPhone muss separat geladen werden.*

Note: For detailed information please see the Instructions for use.
Hinweis: Für detaillierte Informationen nutzen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.