

## ∴ HEINE OMEGA 600/500 Breath Shield - Nettoyage et à la désinfection



OMEGA 600 avec Breath Shield



OMEGA 500 avec Breath Shield

- ∴ Nous recommandons un nettoyage et une désinfection après chaque utilisation.
- ∴ Si vous utilisez un autre désinfectant que celui que nous recommandons, HEINE Optotechnik ne peut pas garantir la résistance du matériau.
- ∴ L'utilisateur doit s'assurer que le désinfectant est adapté à l'application sur le Breath Shield de HEINE et qu'il a l'efficacité requise.
- ∴ Respectez les instructions du fabricant du produit de traitement (par exemple, la durée d'application, etc.).
- ∴ Retirez le Breath Shield de l'ophtalmoscope.
- ∴ Utilisez une lingette désinfectante appropriée, par ex. :  
Peroxyde d'hydrogène (par ex. Incidin OxyWipe ou PREempt Wipes) ou  
Alcool + ammonium quaternaire (p. ex. Super Sani-Cloth)
- ∴ Si le Breath Shield est très sale, vous pouvez d'abord le nettoyer avec un chiffon imbibé de nettoyant avant de le désinfecter, par exemple avec une solution détergente ou enzymatique (par ex. neodisher MediClean).
- ∴ Essuyez complètement le Breath Shield avec la lingette désinfectante, en respectant le temps d'exposition spécifié par le fabricant.
- ∴ Si des résidus sont visibles, essuyez-les avec un chiffon imbibé d'eau et séchez le Breath Shield avec un chiffon propre et sec.
- ∴ Vérifiez si le Breath Shield présente des dommages ou des salissures avant de le réutiliser. En présence de dommages ou de salissures inamovibles, le Breath Shield ne doit plus être utilisé et doit être jeté.
- ∴ Désinfectez le produit avant de le jeter. Les règles d'élimination propres à chaque pays doivent être respectées.