

## Ritrattamento igienico

### Oftalmoscopio indiretto HEINE OMEGA® 500

#### Avvertenza generale e informazioni sulla sicurezza



**AVVERTENZA!** Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente pericolosa. La mancata osservanza può causare lesioni da moderate e gravi.



**NOTA!** Questo simbolo viene utilizzato per informazioni relative a installazione, funzionamento o manutenzione, che sono importanti ma non associate a pericoli.

	Le seguenti istruzioni per il ritrattamento igienico devono essere rispettate in base agli standard nazionali, leggi e linee guida. Devono essere incorporate nelle regole interne di ospedali e ambulatori.
	Se si sospetta una contaminazione, procedere ad una igienizzazione.
	Le misure di ritrattamento descritte non sostituiscono le regole specifiche applicabili in una determinata istituzione/dipartimento.
	HEINE Optotechnik approva unicamente gli agenti e le procedure elencati nelle presenti istruzioni.
	Il ritrattamento igienico deve essere eseguito da persone con competenza igienica adeguata.
	Attenersi alle istruzioni dei produttori delle sostanze di preparazione.
	Evitare che penetrino liquidi nel dispositivo.
	Le procedure di ritrattamento descritte sono riportate con le relative compatibilità di materiale. Il ritrattamento deve essere eseguito secondo un'apposita procedura approvata. HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG non può garantire la disinfezione di queste procedure. Ciò deve essere convalidato dall'utente, per es. l'ospedale o il costruttore dell'attrezzatura di ritrattamento.
	Assicurarsi che lo strumento sia completamente asciutto dopo la pulizia, prima di riutilizzarlo.
	Per informazioni importanti sulle procedure di trattamento, fare riferimento alle domande frequenti relative al ritrattamento igienico sul nostro sito web.



## Disinfezione per strofinamento

### 1. Preparazione

Se si sospetta una contaminazione, procedere ad una igienizzazione.

Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare.

### 2. Pulizia manuale e disinfezione



Prestare attenzione che tutte le superfici siano completamente bagnate per il tempo di esposizione totale specificato dal produttore del disinfettante. Aumentare eventualmente il numero di procedure di strofinamento e/o il numero di passaggi.

#### Attrezzatura

- Detergente, se necessario: enzimatica (ad es. neodisher® MediClean)
- Disinfettante:
  - alcolico (ad es. Incides® N)
  - o
  - alcolico + a base di sali d'ammonio quaternario (ad es. Super Sani-Cloth®)

#### Implementazione

- Per lo sporco più ostinato, è possibile pulire con una salvietta imbevuta di agente di pulizia prima della disinfezione con una salvietta disinfettante.
- Pulire e disinfettare il dispositivo manualmente. (OMEGA 500 e lenti per oftalmoscopia)
- Prestare particolare attenzione alle aree di difficile.
- Strofinare con cura le aree con cui si entra in contatto: ad es. elementi operativi, comandi a rotazione, elementi di blocco.
- Pulire il cuscino in pelle del caschetto con una salvietta imbevuta di agente di pulizia.
- Per rimuovere il disinfettante e quindi asciugare, seguire le istruzioni fornite dal produttore del disinfettante.

### 3. Ispezione e test di funzionamento



- Verificare la presenza di eventuali impurità o contaminanti visibili sul l'apparecchio. Eventualmente igienizzare nuovamente. Se gli agenti contaminanti non possono essere rimossi procedere alla eliminazione.
- Non utilizzate l'apparecchio se rilevate danneggiamenti o abrasioni.

### 4. Conservazione

Conservare in modo da proteggere da ricontaminazione, polvere e umidità.

