




Il paziente viene preparato con una buona illuminazione dell'ambiente




Controllo visivo con HEINE DELTA20T



Marcare i nevi rilevanti

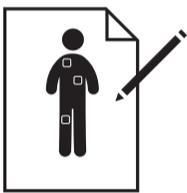


Riportare l'esatta posizione dei nevi sullo schema corporeo (↓ www.heine.com)

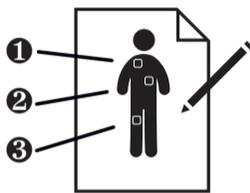


Numerare i nevi nell'ordine esatto (importante per la visita di controllo)



Contrassegnare lo schema corporeo con il numero del paziente

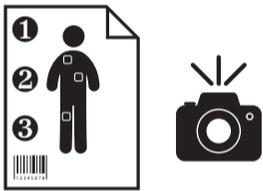


Fotografare lo schema corporeo contrassegnato

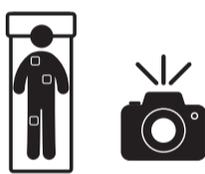


Selezionare l'impostazione della fotocamera per immagine panoramica / realizzare un'immagine panoramica di tutto il corpo




Selezionare l'impostazione per le immagini dermatoscopiche / collegare il dermatoscopio alla fotocamera

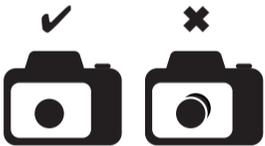

Controllare la qualità dell'immagine

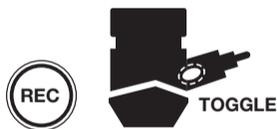

Utilizzare la funzione toggle nella modalità video per riconoscere il Blink Sign

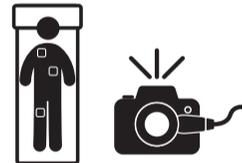

Effettuare le immagini dermatoscopiche in un ordine fisso



Trasferire le immagini / Rinominare / Archiviare le immagini nella cartella del paziente



Eventualmente confrontare con le vecchie immagini in presenza del paziente

