




Patient ist vorbereitet bei guter  
Raumbeleuchtung




Visuelle Untersuchung mit dem  
HEINE DELTA 20 T



Relevanten Naevi markieren

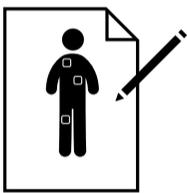


Genauere Position der Naevi in  
Körperschema eintragen  
(↓ [www.heine.com](http://www.heine.com))

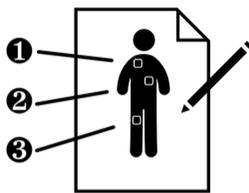


Nummerieren der Naevi in der richtigen  
Reihenfolge (wichtig für Kontrollbesuch)




Kennzeichnen des Körperschemas  
mit der Patientennummer

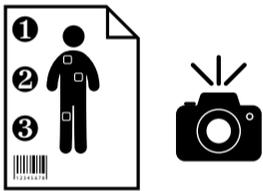


Beschriftetes Körperschema  
abfotografieren

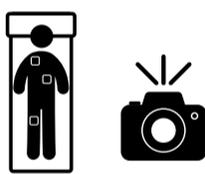

Kamaraeinstellung für Übersichtsaufnahme  
wählen / Übersichtsaufnahme des gesamten  
Körpers erstellen

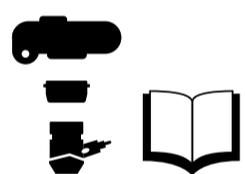


Einstellung für dermatoskopische  
Aufnahmen wählen / Dermatoskop  
mit Kamera verbinden

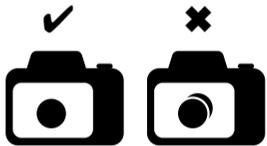

Bildqualität kontrollieren



Nutzen Sie die Toggle-Funktion im Video  
Modus um das Blink Sign zu erkennen

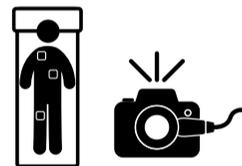

Dermatoskopische Bilder in festgelegter  
Reihenfolge aufnehmen



Bildtransfer / Umbenennen / Ablegen  
der Bilder im Patientenverzeichnis



Gegebenenfalls Vergleich mit älteren  
Bildern in Anwesenheit des Patienten

