

Istruzioni per l'adattatore universale per smartphone HEINE DELTAone e DELTA 30.


Documentazione dermatoscopica digitale con la fotocamera dello smartphone.

È SEMPLICISSIMO!



Con l'adattatore universale per smartphone HEINE è possibile utilizzare in modo flessibile praticamente qualunque smartphone, indipendentemente dal sistema operativo (Android, Windows, ...).

Per molti modelli di iPhone* l'assortimento dei prodotti HEINE comprende delle cover per smartphone su misura con adattatore integrato. Maggiori informazioni alla pagina www.heine.com

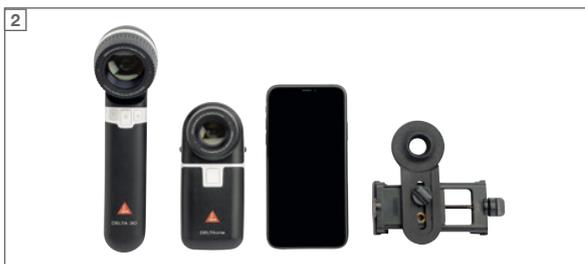

Avete bisogno di un DELTA 30 o DELTAone, di uno smartphone e dell'adattatore giusto (per il DELTA 30 o DELTAone).



Girate la vite di regolazione per regolare il supporto dell'adattatore in base alla larghezza del vostro smartphone. Posizionate il supporto al centro della parte posteriore del vostro smartphone e fissatelo usando la stessa vite di regolazione.



Successivamente, posizionate quindi l'adattatore davanti alla fotocamera dello smartphone: per farlo, allentate la vite di regolazione dell'adattatore, in modo che questo possa spostarsi lateralmente senza fatica e che possa muoversi in avanti e indietro.

Se il vostro smartphone ha una sola fotocamera, fissate l'adattatore al centro di tale fotocamera serrando la vite di regolazione.

Se il vostro smartphone ha più fotocamere, dovrete prima verificare quale sia la fotocamera principale: posizionate quindi l'adattatore in modo che nel suo centro si trovi una delle lenti delle fotocamere del vostro smartphone. Il campo visivo sul motivo nella veduta delle fotocamere è chiaro? Se è tutto a posto, fissate l'adattatore davanti a questa fotocamera.

È quasi fatta!



Il magnete dell'adattatore trattiene ora lo smartphone sull'anello di messa a fuoco del dermatoscopio.

Ora potete scattare le foto come di consueto con la funzione di fotocamera del vostro smartphone.

Cercate una soluzione per la documentazione digitale?

Le informazioni sono disponibili alla pagina:

www.heine.com/it/digital-documentation-derm

*Apple, il logo Apple, iPhone e iPad sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © 2022 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Tutti i diritti riservati.

