

Dermatoscopio HEINE DELTA 30

LO MÁS DESTACADO, EN RESUMEN

Con solo pulsar un botón se puede alternar entre luz polarizada y no polarizada = función «Toggle». Más información en heine.com/es/Toggle

Campo de visión
30mm Ø reales

3 niveles de
luminosidad

on|off

Recarga con cable micro USB
o charger 30 cargador de mesa



Dermatoscopio HEINE DELTA 30



Estado de carga
66 - 100 %



Estado de carga
33 - 66 %



Estado de carga
10 - 33 %



Estado de carga
< 10 %



Para una retención segura,
el disco de contacto encaja
en su lugar con un clic
claramente audible.



El diodo está
iluminado en azul =
iluminación polari-
zada

El diodo está
apagado = ilumina-
ción no polarizada

UN VÍDEO VALE MÁS QUE 1000 PALABRAS



El vídeo «**Application**» muestra el DELTA 30 en acción en el paciente.



Recuerde todos y cada uno de los lunares.

El HEINE DERManager* es el complemento ideal para su DELTA 30. Esta solución de software simplifica la gestión digital de los datos de las imágenes dermatoscópicas.

*Consulte en nuestra página web en qué países está disponible actualmente el DERManager.

