

HEINE DELTAone

L'essentiel en bref

Champ de vision
de 21 mm Ø
véritables

Appuyer sur le
bouton pour passer
du mode d'éclairage
polarisé au mode
non polarisé et
inversement =
fonction « Toggle ».
Plus d'informations sur
heine.com/fr/Toggle

3 niveaux
de luminosité

marche/arrêt



Le HEINE DELTAone

L'essentiel en bref

Appuyer sur le bouton pour passer du mode d'éclairage polarisé au mode non polarisé et inversement = fonction « Toggle ».
Plus d'informations sur heine.com/fr/Toggle

Chargement avec câble micro USB



● État de charge > 25 %

● État de charge < 25 %

★ clignote
État de charge < 10 %

Un film en dit plus long que 1 000 mots



Le film « **Utilisation** » montre le DELTAone en action sur un patient.



Dans le film « **DELTAone DERM App** », vous verrez comment utiliser le DELTAone avec l'application HEINE DERM App exclusive pour la documentation numérique.

