

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

# HEINE EASYCLEAN LED LARYNGOSKOPGRIFF

In Situationen,  
in denen Sie  
100 % verlässliche  
Leistung benötigen.  
Einfache Wiederauf-  
bereitung unter  
Einhaltung aller  
nationalen Normen.



# VERLÄSSLICHE LEISTUNG. EINFACHE WIEDER- AUFBEREITUNG. ZUR SICHERHEIT DER PATIENTEN.



## Einfache, schnelle und sichere Reinigung

- ▶ Sichere Wischdesinfektion des Griffs nach der Anwendung („Intermediate Disinfection“) dank rutschsicherem „Wave-Design“.
- ▶ 100 % wasserdicht. Bei Tauchdesinfektion („High-Level Disinfection“) oder bei Niedrig-Temperatur-Sterilisationsverfahren (STERRAD®, VHP® (Steris)) müssen weder die Batterien noch die LED Beleuchtungseinheit entfernt werden.
- ▶ Autoklavierbare LED-Technologie: Kein Entfernen der Beleuchtungseinheit bei Verwendung in Autoklaven notwendig.

## Ausfallsicher

- ▶ Typ. 10 Stunden Betriebsdauer (EasyClean LED Laryngoskopgriff im Dauerbetrieb).
- ▶ Fade-Out Feature: Langsam abfallende Helligkeit auch bei niedriger Restkapazität, für eine noch effizientere Nutzung der Batterien.
- ▶ Kompatibel mit allen Spateln nach ISO 7376 (Grüner Standard).

## Hygienische Wiederaufbereitungsoptionen:\*

Wiederaufberei- tungsverfahren →	Wischdesinfektion	Manuelle Tauchdesinfektion	Niedrigtemperatur- Gasplasma-Sterilisation (STERRAD®/VHP® (Steris))	Maschinelle Reini- gung + Desinfektion (Thermodesinfektor)	Dampfsterilisation/ Autoklav
Temperatur	Kalt	< 60 °C	< 60 °C	max. 93 °C	max. 134 °C/4 min
mit Batterien	✓	✓	✓	Vorheriges Entfernen der Batterien	Vorheriges Entfernen der Batterien
mit HEINE LED	✓	✓	✓	✓	✓

\*Eine ausführliche Anleitung finden Sie auf [heine.com](http://heine.com)

## Perfekte Sicht

- ▶ Es gibt LED. Und es gibt LED<sup>HO</sup>. HEINE hat einen neuen Standard gesetzt, indem von der Materialauswahl über die Verarbeitung und der Lichtstärke, sowie vom Wärmemanagement bis zu einem möglichst hohen Farbwiedergabe-Index das Beste gerade gut genug ist. Wir nennen das LED in HEINE Qualität. Kurz LED<sup>HO</sup>.
- ▶ Maximale Helligkeit: 3x heller als herkömmliche Halogenbeleuchtung.
- ▶ Praktisch unendliche Lebensdauer.

## Laryngoskopgriffe – Bestellinformation

EasyClean LED – STANDARD	F-008.22.820
EasyClean LED – SLIM	F-008.22.821
EasyClean LED – SHORT	F-008.22.822

- ▶ **Laden Sie das Buch der Wahrheit herunter, um weitere Informationen zu unseren Laryngoskopspateln zu erhalten: [www.heine.com/BdW](http://www.heine.com/BdW)**