

# HEINE OMEGA 600

## Un bref aperçu des principales caractéristiques

Nous vous remercions d'avoir choisi HEINE OMEGA 600 et vous souhaitons beaucoup de succès et de plaisir à travailler avec votre nouvel instrument.

Si vous souhaitez partager vos expériences ou vos découvertes, nous en serions très heureux : #heine #iuseheine #OMEGA600



**Prise de charge USB-C**  
Charge avec cordon USB-C

**Indicateur de l'état de charge**

- ● ● 66–100 %
- ● ● 33–66 %
- ● ● 10–33 %
- ● ● \* clignote < 10 %

**Régulateur de luminosité**

Marche/arrêt, réglage en continu de l'intensité lumineuse de 3 à 100 % et avec visionBOOST, de 100 à 245 %, pour une amélioration de 20 % de la visibilité en cas d'opacité oculaire (par exemple la cataracte). Peut être positionné pour les utilisateurs droitiers et gauchers.

**Levier de filtre**



Filtres vert éliminant le rouge, jaune et bleu cobalt



La vidéo « Comment configurer votre OMEGA 600 » donne la marche à suivre pour adapter l'instrument selon vos besoins.

# HEINE OMEGA 600

Un bref aperçu des principales caractéristiques



**Fonction de basculement de l'unité optique**  
Pour des interactions plus pratiques avec les patients



**Oculaires**  
Pour adapter au mieux votre instrument à votre vue, vous pouvez remplacer les oculaires +2D montés initialement par des lentilles neutres 0D (fournies avec l'instrument)



**Miroir de second observateur TM2**



**Housse de protection pour verre frontal**



**Réglage largeur**

