

HEINE iC1 Quick Start Guide



Download the HEINE iC1 App in the AppStore.

Download der HEINE iC1 App im AppStore.



Place the iPhone* in the appropriate mobile phone case until it engages. Please make sure the camera is in the correct position.

iPhone in die passende Schale einsetzen bis es einrastet. Darauf achten, dass die Kamera an der richtigen Position ist.*



Attach the mobile phone case to the HEINE iC1 until it engages.

Einsetzen der Adapterschale auf das HEINE iC1, bis es einrastet.




Switch on.

Einschalten.

*Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.



The device automatically starts in polarisation mode. The toggle function allows you to alternate between polarised images and immersion images. *Das Gerät startet im Polarisationsmodus. Mit der Toggle-Funktion kann zwischen Polarisations- und Immersionsaufnahme umgeschaltet werden.*

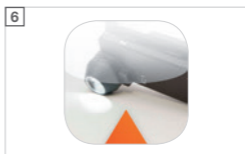

Start the HEINE iC1 App on your iPhone*. *Starten Sie auf ihrem iPhone* die HEINE iC1 App.*



Press your thumb through the opening of the mobile phone case to disengage the iPhone*.

Mit dem Daumen durch die Aussparung das iPhone aus der Schale drücken.*



Charging the HEINE iC1 with the supplied USB cord.

Laden des HEINE iC1 mit dem mitgelieferten USB-Kabel.

Cleaning and Disinfection

Reinigung und Desinfektion



Please note: To prevent damage to the device, do not spray disinfectants or detergents directly onto the contact plate.

Bitte beachten Sie, dass Desinfektions- und Reinigungsmittel nicht direkt auf die Kontaktsscheibe aufgesprüht werden dürfen um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Recommended cleaning agent for Dermatoscope: Neodisher® MediClean

Recommended disinfectant agent for Dermatoscope: quaternary ammonium compounds (e.g. Cleanisept® Wipes or Microbac® Tissues)

Recommended cleaning agent for contact plate: Neodisher® MediClean

Recommended disinfectant agent for contact plate: quaternary ammonium compounds (e.g. Microbac® Tissues)

Empfohlene Reinigungsmittel Dermatoskop: Neodisher® MediClean

Empfohlene Desinfektionsmittel Dermatoskop: quartäre Ammoniumverbindungen (z.B. Cleanisept® Wipes oder Microbac® Tissues)

Empfohlene Reinigungsmittel Kontaktsscheibe: Neodisher® MediClean

Empfohlene Desinfektionsmittel Kontaktsscheibe: quartäre Ammoniumverbindungen (z.B. Microbac® Tissues)