

Limpieza de las partes ópticas del dispositivo HEINE

Debido a la contaminación de las superficies ópticas exteriores, p. ej., por polvo o huellas dactilares, puede ser necesario limpiarlas.

Nota: Los productos de limpieza con disolventes pueden degradar las lentes de plástico o el adhesivo de la lente.

Procedimiento:

- En primer lugar, eliminar con cuidado las partículas sueltas con aire comprimido o un cepillo especial para aparatos ópticos.
- Humedecer un bastoncillo de algodón o una toallita especial para limpiar aparatos ópticos (p. ej., Lens Cleaning Tissue 105 de Whatman o Lens Cleaning Paper de Tiffen) y retirar el exceso de humedad dando unos golpecitos con un material absorbente limpio.
 - Para el primer paso de limpieza: Usar agua.
 - Para contaminantes aceitosos y grasientos: Usar una solución suave de detergente y agua destilada (p. ej., 5 gotas en 10 ml).
- Limpiar siempre realizando un movimiento en espiral desde el centro con poca presión.
- Repetir la limpieza en espiral con bastoncillos de algodón o toallitas especiales recién humedecidos hasta conseguir el resultado deseado.
- Retirar los restos de líquido de limpieza con un bastoncillo de algodón o una toallita especial secos.

