

# Reconditionnement hygiénique

## HEINE ophtalmoscope indirect:

### OMEGA® 500, SIGMA® 250

#### Informations générales en matière d'avertissement et de sécurité



**AVERTISSEMENT!** Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect des consignes peut entraîner des accidents corporels mineurs à modérés.



**REMARQUE!** Ce symbole est utilisé pour des informations. Il est important mais ne renvoie pas à un danger.

	Les instructions relatives au reconditionnement hygiénique doivent être respectées sur la base des normes, lois et directives nationales. Les mesures de reconditionnement décrites ne remplacent pas les règles spécifiques en vigueur de votre institution/département.
	En cas de soupçons de contamination, procéder à un traitement hygiénique.
	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG n'approuve que les agents et procédures répertoriés dans ces instructions.
	Le reconditionnement hygiénique doit être effectué par des personnes possédant d'expertise hygiénique adéquate.
	Veuillez tenir compte des instructions du fabricant relatives au fluide de reconditionnement appliqué.
	Éviter la pénétration de liquides dans le dispositif.
	Avant de procéder au traitement, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
	Après le nettoyage, s'assurer que l'appareil est complètement sec avant de le réutiliser.
Limitations en matière de reconditionnement	Contrôler à intervalles réguliers l'intégrité de l'appareil.



## Désinfection par essuyage

### 1. Préparation

Éteindre le dispositif et le laisser refroidir.

Retirer le miroir de second observateur (s'il y a lieu) de l'instrument et le traiter séparément.

### 2. Nettoyage et désinfection manuelle



- Veillez à humidifier entièrement toutes les surfaces contaminées avec le produit désinfectant pendant le temps d'action total préconisé par le fabricant. Si nécessaire, augmenter le nombre de procédures d'essuyage et/ou le nombre d'essuyages.
- Nettoyez et désinfectez les surfaces optiques avec une lingette désinfectante uniquement lorsque cela s'avère nécessaire. Sinon, ou pour éliminer les résidus, nettoyez-les conformément aux instructions « Propreté des parties optiques de vos appareils HEINE » (MED 234574).

#### Équipement

- Lingettes désinfectantes:  
alcoolique (p. ex. Incides N ou mikrozid universal wipes) ou  
alcoolique + d'ammonium quaternaire (p. ex. Super Sani-Cloth)
- Si vous utilisez des agents de reconditionnement autres que ceux recommandés, assurez-vous qu'ils ne soient pas moussants.

#### Mise en œuvre

- Nettoyer et désinfecter le dispositif manuellement.
- Faire tout particulièrement attention aux zones difficiles d'accès.
- Essuyer bien les surfaces que vous touchez : par ex. les éléments de fonctionnement, les commandes rotatives et les éléments de verrouillage.
- Nettoyez le rembourrage du serre-tête avec un chiffon imbibé d'eau ou, si nécessaire, avec une lingette désinfectante.
- Nettoyez et désinfectez le miroir de second observateur (s'il y a lieu) manuellement avec une lingette désinfectante imprégnée d'alcool.
- Nettoyez le câble et le bloc d'alimentation uniquement en cas de nécessité et avec un chiffon sec.
- Pour éliminer le désinfectant et procéder ensuite au séchage, suivre les instructions fournies par le fabricant du désinfectant.

### 3. Inspection et test de fonctionnement



- Inspecter l'appareil à la recherche de contaminants ou d'abrasions visibles. Procéder à un nouveau reconditionnement si nécessaire.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé ou abrasé.

### 4. Stockage

La stocker de sorte à la protéger contre toute recontamination, de la poussière et de l'humidité.

