

Reprocesamiento higiénico

HEINE Charger 30

Advertencia general e información de seguridad:



ADVERTENCIA: Este símbolo advierte de una posible situación peligrosa. La no observancia de las indicaciones puede causar lesiones leves y medias.



NOTA: Este símbolo se emplea para la información, siempre que no puedan entrañar peligro.

	<p>Las instrucciones siguientes sobre el reacondicionamiento higiénico se deben poner en práctica conforme a las normas, leyes y directrices nacionales. Las medidas de reacondicionamiento descritas no sustituyen las reglas específicas aplicables para su institución/departamento.</p>
	<p>Efectúe una depuración higiénica si cree que el aparato ha podido resultar contaminado. HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG solo aprueba los agentes y procedimientos mencionados en estas instrucciones. El reprocesamiento higiénico deben llevarlo a cabo personas con la adecuada experiencia en higiene. Siga las indicaciones del fabricante del agente limpiador. Evite que entre líquido en el dispositivo. Antes de llevar a cabo el reprocesamiento, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación. No debe realizarse ningún acondicionamiento en la fuente de alimentación enchufable. Los procedimientos de reprocesamiento descritos se representan junto con las correspondientes compatibilidades de material. El reprocesamiento se debe llevar a cabo de acuerdo con un proceso de procesamiento aprobado. HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG no puede garantizar la desinfección de estos procedimientos. Debe ser validado por el usuario, por ejemplo el hospital o los fabricantes del equipo de reprocesamiento.</p>
	<p>Colocar en el cargador solo dispositivos acondicionados. Antes de usarlo de nuevo, asegúrese de que el aparato esté completamente seco después de la limpieza.</p>
<p>Limitaciones del reprocesamiento</p>	<p>Compruebe periódicamente la integridad del dispositivo.</p>



Desinfección mediante frotado

1. Desinfección mediante frotado manual

Asegúrese de que todas las superficies contaminadas estén lo suficientemente húmedas durante todo el tiempo de exposición indicado por el fabricante del desinfectante. En caso necesario, aumentar el número de procedimientos de limpieza con un paño y/o el número de paños.

Equipo

- Desinfectante:
alcohólico (p. ej. Incides N o mikrozid universal wipes) o
alcohólico + aminos cuaternarios (p. ej. Super Sani-Cloth)
- Si utiliza agentes de reprocesamiento diferentes de los recomendados, asegúrese de que no hagan espuma.

Realización

- Limpie y desinfecte las superficies contaminadas a mano con un paño.
- Hay que prestar especial atención a las zonas de difícil acceso.
- Para eliminar el desinfectante y secar después, hay que seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante del desinfectante.

2. Inspección y comprobación del funcionamiento

- Comprobar el correcto funcionamiento del aparato antes de su uso. No utilizar, si se detectan daños.

