

Ritrattamento igienico

Dermatoscopi HEINE® iC1 e NC2

Avvertenza generale e informazioni sulla sicurezza



AVVERTENZA! Questa segnalazione indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto di questa avvertenza può portare a lesioni di piccola o media portata.



NOTA! Questo simbolo viene utilizzato per informazioni importanti ma non associate a pericoli.

	<p>Le seguenti istruzioni per il ritrattamento igienico devono essere rispettate in base agli standard nazionali, leggi e linee guida.</p> <p>Le misure di ritrattamento descritte non sostituiscono le regole specifiche applicabili in una determinata istituzione/dipartimento.</p>
	<p>Se si sospetta una contaminazione, procedere ad una igienizzazione.</p> <p>Le piastrine di contatto devono essere sottoposte a un ritrattamento igienico dopo ogni utilizzo.</p> <p>HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG approva unicamente gli agenti e le procedure qui raccomandati.</p> <p>Il ritrattamento igienico deve essere eseguito da persone con competenza igienica adeguata.</p> <p>Attenersi alle istruzioni dei produttori del materiale di trattamento.</p> <p>Evitare che penetrino liquidi nel dispositivo.</p> <p>Evitare la penetrazione di umidità nella porta USB.</p> <p>I metodi di preparazione descritti sono indicati con la corrispondente resistenza del materiale. Il ricondizionamento deve essere svolto secondo una procedura approvata. HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG non può garantire la disinfezione tramite queste procedure. Questa deve essere validata dall'utente, per es. l'ospedale, o dal produttore degli strumenti di ricondizionamento.</p>
<p>Limiti del ritrattamento</p>	<p>Verificare periodicamente l'integrità del dispositivo.</p> <p>Le piastrine di contatto possono essere sottoposte fino a 1000 cicli di ricondizionamento.</p>



Pulizia con disinfezione per strofinamento

1. Preparazione

Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare.

Rimuovere il cavo USB.

Rimuovere dal dermatoscopio la custodia per smartphone e lo smartphone, e ricondizionare separatamente lo smartphone e la custodia.

Procedere alla preparazione igienica delle piastrine di contatto dopo ogni utilizzo.

Rimuovere l'inserto filtrante o la lente supplementare dalla piastrina di contatto.

2. Pulizia manuale e disinfezione



Prestare attenzione ad umettare completamente le superfici per tutto il tempo di applicazione indicato dal produttore della soluzione disinfettante. Aumentare eventualmente il numero di procedure di strofinamento e/o il numero di passaggi.

Attrezzatura

- Detergente, se necessario: enzimatica (ad es. neodisher MediClean)
- Disinfettante:
sali d'ammonio quaternario (per es.: Cleanisept Wipes, Mikrobac Tissues o Sani-Cloth AF3)
- Disinfezione virucida: sali d'ammonio quaternario (per es. Mikrobac Virucidal Tissues)
- Assicurarsi che il materiale di trattamento sia idoneo all'uso sul proprio smartphone. (per es. mikrozyd® universal wipes).

Implementazione

- Per lo sporco più ostinato, è possibile pulire con una salvietta imbevuta di agente di pulizia prima della disinfezione con una salvietta disinfettante.
- Pulire e disinfettare manualmente il dermatoscopio, l'adattatore per smartphone, la custodia per smartphone e lo smartphone.
- Pulire e disinfettare la piastrina di contatto manualmente e separatamente dal dermatoscopio.
- Prestare particolare attenzione alle aree di difficile.
- Pulire le superfici a contatto con il paziente e l'utente con particolare attenzione (per es. strumenti applicativi, elementi di comando, manopole, elementi di fissaggio).
- Per rimuovere il disinfettante e quindi asciugare, seguire le istruzioni fornite dal produttore del disinfettante.

3. Ispezione e test di funzionamento



- Verificare se il dispositivo presenta segni di impurità o usura e, se del caso, effettuare un ritrattamento o, in presenza di impurità non rimosibili, smaltire il prodotto.

4. Conservazione

Conservare in modo da proteggere da ricontaminazione, polvere e umidità.

