

# Hygienische Wiederaufbereitung

## HEINE GAMMA Stethoskope

3.1, 3.2, 3.3, C3

### Allgemeine Warn- und Sicherheitsinformationen



**WARNUNG!** Dieses Symbol macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam. Die Nichtbeachtung kann zu leichten oder mittleren Verletzungen führen.



**HINWEIS!** Dieses Symbol wird für Informationen die wichtig, jedoch nicht mit Gefahren verbunden sind.

	<p>Nachfolgende Angaben zur hygienischen Wiederaufbereitung müssen gemäß nationalen Normen, Gesetzen, Richtlinien und Empfehlungen umgesetzt werden. Die beschriebenen Maßnahmen zur hygienischen Wiederaufbereitung ersetzen nicht die jeweils für den Betrieb gültigen Vorschriften.</p>
	<p>Nehmen Sie bei Kontaminationsverdacht eine hygienische Aufbereitung vor.</p> <p>Das Produkt ist nicht sterilisierbar.</p> <p>HEINE Optotechnik GmbH &amp; Co. KG gibt nur die hier empfohlenen Mittel und Verfahren frei.</p> <p>Die hygienische Wiederaufbereitung ist nur von einer Person mit ausreichender hygienischer Sachkompetenz durchzuführen.</p> <p>Beachten Sie die Angaben der Hersteller der Aufbereitungsmittel.</p> <p>Nicht in Reinigungsflüssigkeit legen und vor Verschmutzungen schützen, damit keine Reinigungsflüssigkeiten oder Festkörper in das Hohlraumssystem des Stethoskopes gelangen.</p>
<p>Einschränkung der hygienischen Wiederaufbereitung</p>	<p>Überprüfen Sie regelmäßig die Unversehrtheit des Geräts.</p>



## Reinigende Wischdesinfektion

### 1. Manuelle reinigende Wischdesinfektion



Achten Sie auf die vollständige Benetzung aller kontaminierten Oberflächen für die komplette vom Desinfektionsmittelhersteller angegebene Einwirkzeit. Erhöhen Sie, wenn hierfür erforderlich, die Anzahl der Wischvorgänge und/oder die Anzahl der Tücher.

#### *Ausstattung*

- Desinfektionsmittel:  
Fugaten-Spray (Lysoform-Spray),  
Alternativ: Esemfix von Schülke, Promanum pure von Braun, Meliseptol Foam pur von Braun.
- Zur Erhaltung der Elastizität des Schlauchs und anderer nicht metallischer Komponenten empfehlen wir ein Vinyl-Pflegemittel zu verwenden.

#### *Durchführung*

- Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt manuell.
- Achten Sie besonders auf schwer zugängliche Stellen.
- Wischen Sie die berührten Flächen besonders gründlich.
- Wischen Sie anschließend mit einem mit sauberem Wasser getränkten Tuch nach.
- Entfernen Sie die Rückstände und trocknen Sie das Gerät wie vom Hersteller des Desinfektionsmittels gefordert.

### 2. Kontrolle und Funktionsprüfung



- Das Gerät auf sichtbare Verunreinigungen prüfen und gegebenenfalls erneut aufbereiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.

### 3. Lagerung

Geschützt vor einer Rekontamination, Staub und Feuchtigkeit.

