

HEINE adaptador universal para smartphone mag para DELTA 30 PRO, DELTA 30 y DELTAone.

Documentación dermatoscópica digital con la cámara del smartphone.


¡ASÍ ES MUY SENCILLO!



Con el adaptador universal para smartphone mag de HEINE puede usar prácticamente cualquier smartphone independiente-mente del sistema operativo (Android, Windows, etc.)*.



Lo siguiente es colocar el adaptador sobre el botón fix.

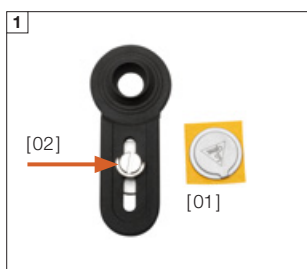

NOTA IMPORTANTE

¡Mantenga el botón fix [01] separado de los imanes antes de colocarlo en el soporte de teléfono móvil!

Si a pesar de todo se encuentran, separe el tornillo [02] del adaptador, a continuación gírelo de nuevo hacia dentro y separe así las dos placas desplazándolas.



Afloeje ligeramente el tornillo.

Si su smartphone solo tiene una cámara, fije el adaptador por el centro delante de dicha cámara.

Si su smartphone tiene varias cámaras, primero debe comprobar cuál de ellas es la cámara principal: coloque el brazo del adaptador en el lado trasero del smartphone de forma que una de las lentes de las cámaras esté en el centro. ¿Es claro el campo de visión sobre el motivo en la vista de cámara? Si todo es correcto, apretar con el tornillo el brazo del adaptador delante de dicha cámara.



Necesita un DELTA 30 PRO, un DELTA 30 o un DELTAone y el adaptador universal para smartphone mag, que consta de botón fix y adaptador, así como su smartphone y un soporte de teléfono móvil adecuado para él**.

El soporte de teléfono móvil debe tener un lado trasero duro de polí-carbonato o cristal acrílico.



Retirar la película protectora y colocar a presión el botón fix en el soporte de teléfono móvil a la derecha bajo la lente de la cámara seleccionada.



El imán del adaptador sujeta ahora el teléfono móvil junto con el soporte sobre el anillo de enfoque del dermatoscopio.

Entonces ya puede hacer fotos como de costumbre con la función de cámara de su smartphone.



*Todas las marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

**El smartphone y el soporte para teléfono móvil no se incluyen en el material suministrado.

