

## : Breath Shield HEINE OMEGA 500 - Limpieza y la desinfección



- : Recomendamos realizar una limpieza y una desinfección tras cada uso.
- : Si utiliza un desinfectante diferente del recomendado por nosotros, HEINE Optotechnik no puede garantizar la resistencia del material.
- : El usuario debe cerciorarse de si el desinfectante es adecuado para su uso con el HEINE Breath Shield y si produce el efecto necesario.
- : Tenga en cuenta los datos del fabricante del producto de limpieza (p. ej. duración del uso, etc.).
- : Retire del oftalmoscopio el Breath Shield.
- : Seleccione un paño de desinfección adecuado, p. ej. peróxido de hidrógeno (p. ej. Incidin OxyWipe o PREempt Wipes) o alcohol + aminos cuaternarios (p. ej. Super Sani-Cloth)
- : En caso de suciedad persistente, puede limpiar primero el Breath Shield con un paño empapado en producto de limpieza antes de desinfectarlo, p. ej., solución de detergente o enzimática (p. ej. neodisher MediClean).
- : Limpie con el paño desinfectante el Breath Shield en su totalidad y respetando el tiempo de actuación indicado por el fabricante.
- : Si se pueden ver residuos, repáselos con un paño empapado en agua y seque a continuación el Breath Shield con un paño limpio y seco.
- : Antes de volver a utilizarlo, compruebe si el Breath Shield está sucio o dañado. Si constata daños o suciedad que no se puede eliminar, el Breath Shield ya no se puede utilizar y es necesario eliminarlo.
- : Desinfecte el producto antes de proceder a su eliminación. Se deben tener en cuenta los correspondientes reglamentos de eliminación de residuos específicos del país.