

∴ HEINE OMEGA 500 Breath Shield - Pulizia e la disinfezione



- ∴ Raccomandiamo la pulizia e la disinfezione dopo ogni uso.
- ∴ Se si utilizza un disinfettante diverso da quello da noi raccomandato, HEINE Optotechnik non sarà in grado di fornire nessuna garanzia sulla resistenza del materiale.
- ∴ L'utilizzatore deve verificare che il disinfettante sia adatto all'impiego con Breath Shield HEINE e che sia efficace.
- ∴ Rispettare le indicazioni del produttore del disinfettante (ad esempio rispetto alla durata di applicazione, ecc.).
- ∴ Togliere Breath Shield dall'oftalmoscopio.
- ∴ Scegliere una salvietta disinfettante adatta, ad esempio:
perossido di idrogeno (ad esempio Incidin OxyWipe o PREempt Wipes)
alcol + composti d'ammonio quaternario (ad es. Super Sani-Cloth)
- ∴ In presenza di sporcizia ostinata, è possibile pulire Breath Shield con una salvietta imbevuta di detergente prima di disinfettarlo, ad esempio usando una soluzione di detersivo per i piatti o enzimatica (ad esempio neodisher MediClean).
- ∴ Detergere completamente Breath Shield con la salvietta disinfettante rispettando il tempo di azione indicato dal produttore.
- ∴ In presenza di residui visibili, detergere con una salvietta imbevuta d'acqua e asciugare Breath Shield con una salvietta asciutta e pulita.
- ∴ Controllare la presenza di danni o impurità su Breath Shield prima di riutilizzarlo.
In presenza di danni o impurità non eliminabili, Breath Shield non sarà più utilizzabile e dovrà essere sostituito.
- ∴ Disinfettare il prodotto prima dello smaltimento. Devono essere rispettate le norme di smaltimento nazionali specifiche.