

## ∴ Breath Shield HEINE OMEGA 500


**Breath Shield para una vista despejada al realizar exploraciones con el oftalmoscopio indirecto con cinta craneal HEINE OMEGA 500.**

∴ **La mejor visibilidad** a través del oftalmoscopio gracias al espacio recortado en la parte de la óptica.

∴ **Fácil de sujetar.**



Coloque el Breath Shield sobre el lado delantero del instrumento por debajo del logotipo de HEINE de forma que el espacio recortado del Breath Shield quede directamente sobre la ventana óptica.

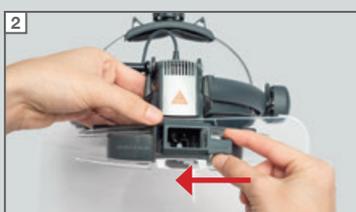

Tome el clip de sujeción adjunto y desplácelo sobre el carril del instrumento.

∴ **Limpieza y desinfección:**



Para limpiar y desinfectar, retire del instrumento tanto el Breath Shield transparente como el clip de sujeción.

Antes de volver a utilizarlo, compruebe si el Breath Shield está sucio o dañado. Si constata daños o suciedad que no se puede eliminar, el Breath Shield ya no se puede utilizar y es necesario eliminarlo. Desinfecte el producto antes de proceder a su eliminación. Se deben tener en cuenta los correspondientes reglamentos de eliminación de residuos específicos del país. Puede encontrar indicaciones exhaustivas sobre la limpieza y la desinfección del Breath Shield en [heine.com/es/breath-shield](https://heine.com/es/breath-shield)

∴ Material ligero y de forma estable.

∴ Dimensiones, anchura x longitud: 231 mm x 205,08 mm.

∴ Exclusivamente para usar con el HEINE OMEGA 500.

### Opciones de pedido

Puede pedir los Breath Shields a su distribuidor de productos de tecnología médica. Disponible como artículo individual o en un set de tres unidades.

### Números de artículo

∴ Breath Shield HEINE OMEGA 500 (1 Breath Shield, 1 clip de sujeción): **C-000.33.016**

∴ Breath Shield HEINE OMEGA 500 (3 Breath Shields, 1 clip de sujeción): **C-000.33.017**