


Universal Smartphone Connector für HEINE DELTA 30 und DELTAone. Digitale dermatoskopische Dokumentation mit der Smartphone-Kamera.

SO GEHT'S GANZ EINFACH!




1 Mit dem HEINE Universal Smartphone Connector können Sie praktisch jedes Smartphone, unabhängig vom Betriebssystem (Android, Windows, ...) verwenden.
Für die meisten iPhone* Modelle hat HEINE passgenaue Handyschalen im Produktprogramm, bei denen der Adapter schon fest verklebt ist.

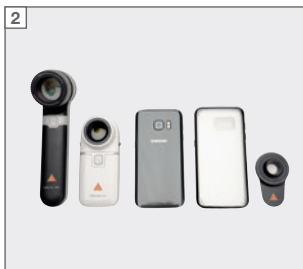

2 Sie benötigen also ein DELTA 30 oder DELTAone, den Connector und eine zu Ihrem Smartphone passende Handyschale**.



3 Der Connector eignet sich nur für Handyschalen mit glatter Oberfläche, die Kamera darf nicht aus der Schale herausragen.

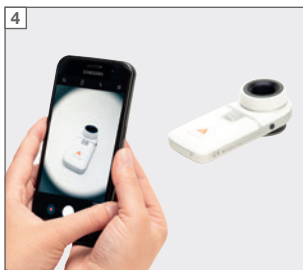

4 Hat Ihr Smartphone nur eine Kamera, fixieren Sie den Connector mittig vor dieser Kamera.



Hat Ihr Smartphone mehrere Kameras, sollten Sie zunächst testen, welche der Kameras die Hauptkamera ist: Legen Sie den Connector so auf die Rückseite des Smartphones, dass eine der Kameralinsen im Zentrum liegt. Ist das Sichtfeld auf das Motiv in der Kameraansicht klar? Wenn alles passt, den Connector vor dieser Kamera aufkleben.



5 Schutzfolie abziehen und den Connector vor der ausgewählten Kameralinse mittig fest andrücken.



6 Schon fast fertig!



7 Der Magnet des Connectors hält nun das Handy samt Schale auf dem Fokussierring des Dermatoskops.

Jetzt können Sie mit der Kamerafunktion Ihres Smartphones wie gewohnt Fotos machen.

*Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. HEINE empfiehlt die Verwendung eines iPhones ab Version 6. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**Das Smartphone und die Handyschale sind nicht im Lieferumfang enthalten.