

## Ritrattamento igienico

**HEINE® EN50 UNPLUGGED**

**HEINE® mPack UNPLUGGED**

### Avvertenza generale e informazioni sulla sicurezza:



**AVVERTENZA!** Questa segnalazione indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto di questa avvertenza può portare a lesioni di piccola o media portata.



**NOTA!** Questo simbolo viene utilizzato per informazioni relative a installazione, funzionamento o manutenzione, che sono importanti ma non associate a pericoli.

	<p>Le seguenti istruzioni per il ritrattamento igienico devono essere rispettate in base agli standard nazionali, leggi e linee guida.</p> <p>Devono essere incorporate nelle regole interne di ospedali e ambulatori.</p>
	<p>Se si sospetta una contaminazione, procedere ad una igienizzazione.</p> <p>Le misure di ritrattamento descritte non sostituiscono le regole specifiche applicabili in una determinata istituzione/dipartimento.</p> <p>HEINE Optotechnik approva unicamente gli agenti e le procedure elencati nelle presenti istruzioni.</p> <p>Il ritrattamento igienico deve essere eseguito da persone con competenza igienica adeguata.</p> <p>Attenersi alle istruzioni dei produttori delle sostanze di preparazione.</p> <p>Evitare che penetrino liquidi nel dispositivo.</p> <p>Prima del trattamento, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione.</p> <p>Le procedure di ritrattamento descritte sono riportate con le relative compatibilità di materiale. Il ritrattamento deve essere eseguito secondo un'apposita procedura approvata. HEINE Optotechnik GmbH &amp; Co. KG non può garantire la disinfezione di queste procedure. Ciò deve essere convalidato dall'utente, per es. l'ospedale o il costruttore dell'attrezzatura di ritrattamento.</p>
	<p>Assicurarsi che lo strumento sia completamente asciutto dopo la pulizia, prima di riutilizzarlo.</p> <p>Per informazioni importanti sulle procedure di trattamento, fare riferimento alle domande frequenti relative al ritrattamento igienico sul nostro sito web.</p>



## Disinfezione per strofinamento

### 1. Preparazione

Se si sospetta una contaminazione, procedere ad una igienizzazione.

Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare.

### 2. Pulizia manuale e disinfezione



Prestare attenzione che tutte le superfici siano completamente bagnate per il tempo di esposizione totale specificato dal produttore del disinfettante. Aumentare eventualmente il numero di procedure di strofinamento e/o il numero di passaggi.

#### Attrezzatura

- Detergente, se necessario: enzimatica (ad es. neodisher® MediClean)
- Disinfettante:  
a base di sali d'ammonio quaternario (ad es. Cleanisept® Wipes , Mikrobac® Tissues o Sani-Cloth® AF3)  
o  
perossido di idrogeno (ad es. PREempt™ Wipes)

#### Implementazione

- Per lo sporco più ostinato, è possibile pulire con una salvietta imbevuta di agente di pulizia prima della disinfezione con una salvietta disinfettante.
- Pulire e disinfettare il dispositivo manualmente. (mPack UNPLUGGED + EN50 UNPLUGGED))
- Prestare particolare attenzione alle aree di difficile.
- Strofinare con cura le aree con cui si entra in contatto.
- Per rimuovere il disinfettante e quindi asciugare, seguire le istruzioni fornite dal produttore del disinfettante.

### 3. Ispezione e test di funzionamento



- Verificare la presenza di eventuali impurità o contaminanti visibili sul l'apparecchio. Eventualmente igienizzare nuovamente. Se gli agenti contaminanti non possono essere rimossi procedere alla eliminazione.
- Non utilizzate l'apparecchio se rilevate danneggiamenti o abrasioni.

### 4. Conservazione

Conservare in modo da proteggere da ricontaminazione, polvere e umidità.

