

Ritrattamento igienico

HEINE® mPack mini, mPack, mPack LL e Stazione di carica EN 50

Avvertenza generale e informazioni sulla sicurezza:



AVVERTENZA! Questa segnalazione indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto di questa avvertenza può portare a lesioni di piccola o media portata.



NOTA! Questo simbolo viene utilizzato per informazioni relative a installazione, funzionamento o manutenzione, che sono importanti ma non associate a pericoli.

	<p>Le seguenti istruzioni per il ritrattamento igienico devono essere rispettate in base agli standard nazionali, leggi e linee guida.</p> <p>Devono essere incorporate nelle regole interne di ospedali e ambulatori.</p>
	<p>Se si sospetta una contaminazione, procedere ad una igienizzazione.</p> <p>Il dispositivo non deve essere immerso in liquidi.</p> <p>Le misure di ritrattamento descritte non sostituiscono le regole specifiche applicabili in una determinata istituzione/dipartimento.</p> <p>HEINE Optotechnik approva unicamente gli agenti e le procedure elencati nelle presenti istruzioni.</p> <p>Il ritrattamento igienico deve essere eseguito da persone con competenza igienica adeguata.</p> <p>Attenersi alle istruzioni dei produttori delle sostanze di preparazione.</p> <p>Evitare che penetrino liquidi nel dispositivo.</p> <p>Evitare che penetri umidità nell'area della connessione USB.</p> <p>Prima del trattamento, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione.</p> <p>Le procedure di ritrattamento descritte sono riportate con le relative compatibilità di materiale. Il ritrattamento deve essere eseguito secondo un'apposita procedura approvata. HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG non può garantire la sterilità e la disinfezione di queste procedure. Ciò deve essere convalidato dall'utente, per es. l'ospedale o il costruttore dell'attrezzatura di ritrattamento.</p>
	<p>Assicurarsi che lo strumento sia completamente asciutto dopo la pulizia, prima di riutilizzarlo.</p> <p>Per informazioni importanti sulle procedure di trattamento, fare riferimento alle domande frequenti relative al ritrattamento igienico sul nostro sito web.</p>



Disinfezione per strofinamento

1. Preparazione

Se si sospetta una contaminazione, procedere ad una igienizzazione.

Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare.

In caso di contaminazione a applicazioni a rischio elevato, estrarre mPack mini dalla clip per cintura e preparalo a parte.

2. Pulizia manuale e disinfezione



Prestare attenzione che tutte le superfici siano completamente bagnate per il tempo di esposizione totale specificato dal produttore del disinfettante. Aumentare eventualmente il numero di procedure di strofinamento e/o il numero di passaggi.

Attrezzatura

- Detergente, se necessario: enzimatica (ad es. neodisher® MediClean)
- Disinfettante (per le mPacks, stazione di carica EN 50 e clip da cintura):
alcolico (ad es. Incides® N),
a base di sali d'ammonio quaternario (ad es. Cleanisept® Wipes , Mikrobac® Tissues o Sani-Cloth® AF3),
alcolico + a base di sali d'ammonio quaternario (ad es. Super Sani-Cloth®)
o
perossido di idrogeno (ad es. PREempt™ Wipes)
- Disinfettante (Per el marsupio con clip): a base di sali d'ammonio quaternario (ad es. neodisher® Septo MED)

Implementazione

- Per lo sporco più ostinato, è possibile pulire con una salvietta imbevuta di agente di pulizia prima della disinfezione con una salvietta disinfettante.
- Pulire e disinfettare il dispositivo manualmente. (mPacks, stazione di carica EN 50 e clip da cintura)
- Prestare particolare attenzione alle aree di difficile.
- Strofinare con cura le aree con cui si entra in contatto: ad es. elementi operativi, comandi a rotazione, elementi di blocco.
- Lavare el marsupio con clip (senza mPack mini) con acqua calda e un detergente. Dopo l'asciugatura deve aver luogo una disinfezione per immersione.
- Durante la preparazione, tenere mPack o la stazione di carica EN 50 con le relative aperture rivolte verso il basso.
- Per rimuovere il disinfettante e quindi asciugare, seguire le istruzioni fornite dal produttore del disinfettante.

3. Ispezione e test di funzionamento



- Verificare la presenza di eventuali impurità o contaminanti visibili sul l'apparecchio. Eventualmente igienizzare nuovamente. Se gli agenti contaminanti non possono essere rimossi procedere alla eliminazione.
- Non utilizzate l'apparecchio se rilevate danneggiamenti.

4. Conservazione

Conservare in modo da proteggere da ricontaminazione, polvere e umidità.

