

HEINE Adaptateur Smartphone Universel mag pour DELTA 30 PRO, DELTA 30 et DELTAone.

Documentation dermatoscopique numérique avec la caméra du smartphone.

SIMPLE COMME BONJOUR !




Avec l'Adaptateur Smartphone Universel mag HEINE, vous pouvez utiliser pratiquement n'importe quel smartphone, quelle que soit la disposition de la caméra.

⚠ L'adaptateur est livré avec deux boutons de fixation de différentes hauteurs. Vérifiez lequel convient à la hauteur de la caméra de votre smartphone.



Ensuite, appliquez l'adaptateur sur le bouton de fixation.

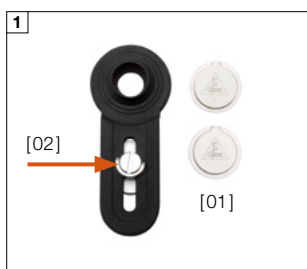


⚠ Avant de fixer l'adaptateur sur la coque du téléphone, veuillez à bien séparer le bouton de fixation [01] et le support magnétique !

Si les deux éléments sont collés l'un à l'autre, retirez la vis [02] du bras de l'adaptateur. Insérez la vis directement dans le filetage du support magnétique et séparez les deux éléments.



Vous avez besoin d'un DELTA 30 PRO, DELTA 30 ou DELTAone et de l'Adaptateur Smartphone Universel mag, composé d'un bouton de fixation + d'un adaptateur, ainsi que de votre smartphone et d'une coque de téléphone portable adaptée*. La coque du téléphone portable doit avoir une face arrière dure en polycarbonate ou en verre acrylique.

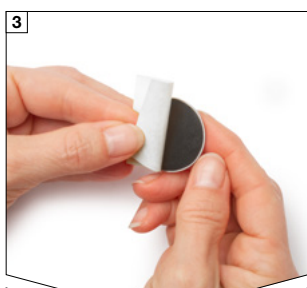

Retirer le film de protection et appuyer fermement sur le bouton de fixation à droite, sous la lentille de la caméra choisie, au centre de la coque du téléphone portable.



Desserrez légèrement la vis.

Si votre smartphone n'a qu'une seule caméra, fixez l'adaptateur au centre devant cette caméra.

Si votre smartphone est équipé de plusieurs caméras, vous devez d'abord vérifier quelle est la caméra principale : placez le bras de l'adaptateur au dos du smartphone de manière à ce qu'une des lentilles de la caméra se trouve au centre. Le champ de vision sur le sujet est-il clair en vue caméra ? Si tout est correct, fixer le bras de l'adaptateur devant cette caméra à l'aide de la vis.



L'aimant de l'adaptateur maintient maintenant le téléphone portable et sa coque sur la bague de mise au point du dermatoscope.

Vous pouvez maintenant prendre des photos avec votre smartphone comme vous en avez l'habitude.



Vous trouverez le tutoriel vidéo ici : www.heine.com/how-to-smartphone-adapter-mag

*Le smartphone et la coque du téléphone portable ne sont pas inclus dans la livraison.

