

# Adattatore Universale Per Smartphone mag HEINE per DELTA 30 PRO, DELTA 30 e DELTAone.

Documentazione dermatoscopica digitale con la fotocamera dello smartphone.

## È SEMPLICISSIMO!




Con l'Adattatore Universale Per Smartphone mag HEINE è possibile utilizzare praticamente qualunque smartphone o tablet, indipendentemente dalla disposizione delle fotocamere.

⚠ Con l'adattatore vengono forniti due bottoni di fissaggio di diverse altezze. Verificate quale è quello adatto all'altezza della fotocamera del vostro smartphone.



Applicare quindi l'adattatore sul bottone di fissaggio.

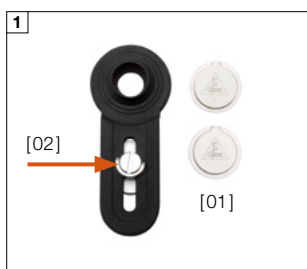

⚠ Tenere il bottone di fissaggio [01] separato dal supporto magnetico prima dell'applicazione sulla cover per smartphone!

Se i due pezzi dovessero comunque unirsi, separare la vite [02] dal braccio adattatore. Avvitare la vite direttamente nella filettatura del supporto magnetico e separare i due elementi.



Allentare leggermente la vite.

Se il vostro smartphone ha una sola fotocamera, fissate l'adattatore al centro davanti a tale fotocamera.

Se il vostro smartphone ha più fotocamere, dovrete prima verificare quale sia la fotocamera principale: posizionate l'adattatore sulla parte posteriore del vostro smartphone in modo che sia centrato sulla fotocamera principale. Il campo visivo sul motivo nella veduta delle fotocamere è chiaro? Se tutto è in ordine, avvitare il braccio dell'adattatore davanti a questa fotocamera con la vite.



Avete bisogno di un DELTA 30 PRO, DELTA 30 o DELTAone e dell'Adattatore Universale Per Smartphone mag, composto da bottone di fissaggio + adattatore, del vostro smartphone e di una cover adeguata\*.

La cover dovrebbe avere la parte posteriore rigida in policarbonato o in vetro acrilico.



Togliere la pellicola protettiva e posizionare saldamente il bottone di fissaggio sulla cover a destra al di sotto della lente della fotocamera selezionata.



Il magnete dell'adattatore permetterà di agganciare ora lo smartphone e la sua cover all'anello di messa a fuoco del dermatoscopio.

Ora potete scattare le foto come di consueto con la funzione di fotocamera del vostro smartphone.



Il video tutorial è disponibile qui: [www.heine.com/how-to-smartphone-adapter-mag](http://www.heine.com/how-to-smartphone-adapter-mag)

\*Lo smartphone e la cover non sono compresi nel volume di fornitura.

